




Lathund Ljudslangor, insatser och vaxfilter

Gäller för ReSound och Beltone hörapparater

En hjälpande hand -

En guide till dig som arbetar med våra produkter. Denna översikten visar vilka ljudslangar och insatser samt vilket vaxfilter som passar till vilken hörapparatmodell från GN Hearing AB. Du är alltid välkommen att höra av dig på vårt SUPPORTnummer om du behöver hjälp!

Ljudslang - Thintube

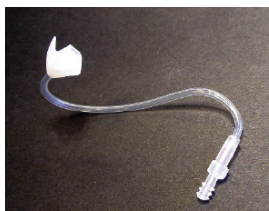

ReSound

LiNX	977, 777, 577
Verso	977, 777, 577 967, 767, 567
Up	977, 777 967, 767
Up Smart	977, 777
Alera	977, 777, 577 967, 767, 567

Beltone

First	1778, 978, 678
Promise	1778, 978, 678 1766, 966, 666
True	1778, 978, 678 1766, 966, 666

Receiver/Hörtelefon

- S
- NP
- HP
- HP2

ReSound

LiNX	961, 761, 561
Verso	962, 762, 562 961, 761, 561 960, 760, 560
Alera	962, 762, 562 961, 761, 561 960, 760, 560

Beltone

First	1763, 963, 663
Promise	1764, 964, 664 1763, 963, 663 1762, 962, 662
True	1764, 964, 664 1763, 963, 663 1762, 962, 662

S



NP



HP



HP2



PunktInsats

- S-receiver

ReSound

LiNX	961, 761, 561
Verso	962, 762, 562 961, 761, 561 960, 760, 560
Alera	962, 762, 562 961, 761, 561 960, 760, 560

Beltone


First	1763, 963, 663
Promise	1764, 964, 664 1763, 963, 663 1762, 962, 662
True	1764, 964, 664 1763, 963, 663 1762, 962, 662

1



Välj önskad längd på hörtelefonen.

2

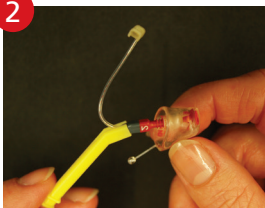

För att lättare montera hörtelefonen på plats i PunktInsatsen kan du behöva använda det gula verktyget.

3



Utdragstråden skall alltid ligga i nederkant av örat, se bilden.

PunktInsats

- NP-receiver


ReSound

LiNX	961, 761, 561
Verso	962, 762, 562 961, 761, 561 960, 760, 560
Alera	962, 762, 562 961, 761, 561 960, 760, 560

Beltone


First	1763, 963, 663
Promise	1764, 964, 664 1763, 963, 663 1762, 962, 662
True	1764, 964, 664 1763, 963, 663 1762, 962, 662

1

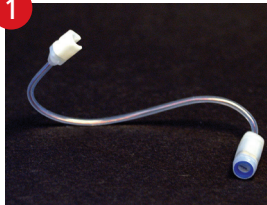

Välj önskad längd på hörtelefonen.

2

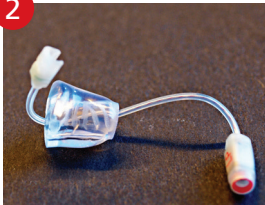

Trä in ljudslangens kontaktände genom insatsen. Trä insatsen genom hela ljudslangen ner till hörtelefonen.

3



Justera ljudslangens vinkel innan du drar hörtelefonen på plats.

PunktInsats

- NP-receiver


Denna görs endast vid
platsbrist

ReSound


LiNX	961, 761, 561
Verso	962, 762, 562 961, 761, 561 960, 760, 560
Alera	962, 762, 562 961, 761, 561 960, 760, 560

Beltone


First	1763, 963, 663
Promise	1764, 964, 664 1763, 963, 663 1762, 962, 662
True	1764, 964, 664 1763, 963, 663 1762, 962, 662

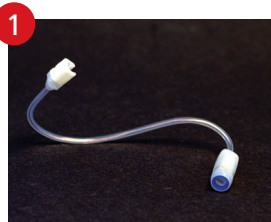

Välj önskad längd på hör-
telefonen.

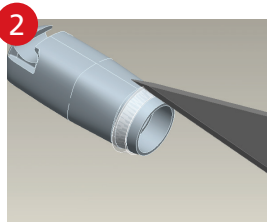

För att använda hörtelefon
med PunktInsats måste man
först skära bort plastringen
vid hörtelefonmynningen.

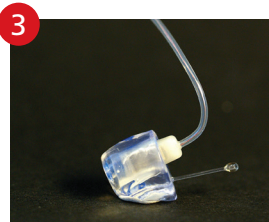

Tryck fast hörtelefonen, ut-
dragstråden skall alltid ligga i
nederkant av örat, se bilden.

PunktInsats


- HP-receiver

ReSound

LiNX	961, 761, 561
Verso	962, 762, 562 961, 761, 561 960, 760, 560
Alera	962, 762, 562 961, 761, 561 960, 760, 560

Beltone


First	1763, 963, 663
Promise	1764, 964, 664 1763, 963, 663 1762, 962, 662
True	1764, 964, 664 1763, 963, 663 1762, 962, 662

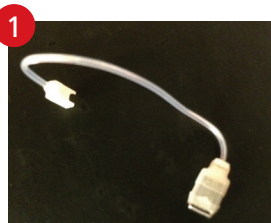

Välj önskad längd på HP-hör-
telefonen



Trä in ljudslangens kontakt-
ände i insatsen.

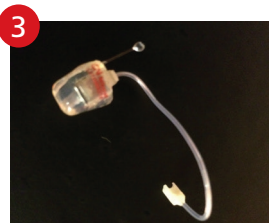

Utdragstråden skall alltid
ligga i nederkant av örat.

SpecialVent


ReSound

LiNX	977, 777, 577
Verso	977, 777, 577 967, 767, 567
Up	977, 777 967, 767
Up Smart	977, 777
Alera	977, 777, 577 967, 767, 567

Beltone

First	1778, 978, 678
Promise	1778, 978, 678 1766, 966, 666
True	1778, 978, 678 1766, 966, 666

1

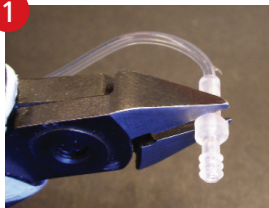

Välj önskad ljudslang och klipp av stödvingen samt klipp av ljudslangen precis innanför falsen.

2



För ljudslangen genom insatsen i den nedre kanalen och tryck sedan upp den i den övre kanalen.

3



Dra tillbaka ljudslangen in i insatsen och vrid till rätt läge vertikalt.

SpecialVent

Denna görs endast vid platsbrist


ReSound

LiNX	977, 777, 577
Verso	977, 777, 577 967, 767, 567
Up	977, 777 967, 767
Up Smart	977, 777
Alera	977, 777, 577 967, 767, 567

Beltone

First	1778, 978, 678
Promise	1778, 978, 678 1766, 966, 666
True	1778, 978, 678 1766, 966, 666

1

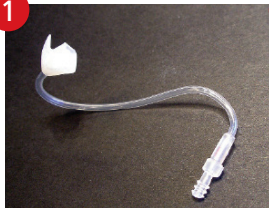

Välj önskad ljudslang och klipp av stödvingen

2



Klipp av ljudslangen precis innanför falsen.

3



Tryck in ljudslangen in i slangen i skalet och vrid till rätt läge vertikalt.

Vaxfilter - Nanocare/Cerustop

Används med;

- S-receiver
- HP2- receiver




1



Ta bort filter

Placera verktygspinnen (ändan utan filter) i det använda filtret i hörapparaten, vrid ett halvt varv och dra försiktigt ut pinnen igen. Om det är svårt att få ut filtret prova att vrida åt andra hållet.

2

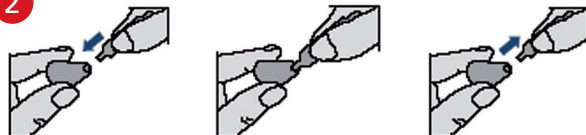

Sätt i nytt filter

Placera nu den motsatta delen av verktygspinnen (ändan med det nya filtret) på samma ställe i hörapparaten, vrid ett halvt varv och dra ut pinnen igen.

Vaxfilter

- HF3

Används med;

- Hörtelefon LP
- Hörtelefon NP
- Punktinsats - äldre insats, där HF3 filter sitter fastmonterat i punktinsatsen


1



Ta bort filter


Placera den blå verktygsspinnen (den gängade delen) i det använda filtret i hörapparaten.

2

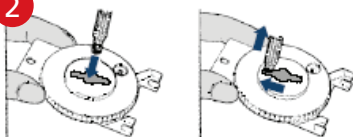

Tag bort det använda filtret från pinnen i mitten av filterhållaren.

3

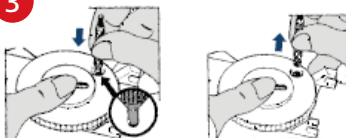

Sätt i nytt filter

Vrid runt det färgade filterhjulet tills du ser ett nytt filter i öppningen. Tryck ner verktygsspinnen (den blå änden) i hålet. Dra upp pinnen med det nya filtret.

4



Det nya filtret monteras i hörapparaten med ett lätt tryck. När du känner ett klick har det monterats korrekt. Lossa verktygsspinnen genom att försiktigt vicka pinnen fram och tillbaka medan du drar ur den.



GN Hearing AB
Box 21075
200 21 MALMÖ
Tel. 031-800 150
www.gnhearing.se