

Sound Enhancer Hjälpguide – GN Hearing Tuner



Beltone Silk 17, Beltone Legend 17, Beltone Boost Plus 17
Varje Sound Enhancer kontroll är beroende av vad som programmerats i hörapparaten.

Tillgänglighet i program	Buller	Tal	Vind
All-around	○	○	○
Restaurant	●	●	○
Party	●	●	○
Music	●	○	○
Traffic	●	○	○
Outdoor	●	○	●
Acoustic Phone	○	○	○
TC (in normal program)	●		
TC telefon (in normal program)	●		
DAI (in normal program)	●		

- Tillgänglig vid förinställda inställningar
- Tillgänglig i manuella program per inställning om:
 - Buller: Brusreducering II inte står i "per miljö"
 - Tal: Riktverkan står som Automatiskt Adaptiv Riktverkan eller SoftSwitching
 - Vind: Vindbrusreducering är påslagen i hörapparaten

Programmen i hörapparaterna måste innehålla samma inställning. T.ex. måste vindbrusreduktion finnas i programmet för att "Vind" ska synas i appen.

Programmen i hörapparaterna måste ha samma värden. T.ex. måste "SSP: Andel riktverkan" vara likvärdig på båda öronen.

Användaren måste ha båda hörapparaterna i samma program för att justering ska vara möjlig.

Om användaren vill är det möjligt att spara "Favoriter" av sina mest använda justeringar och på så sätt skapa extra program.

