

Sound Enhancer Hjälpguide – ReSound Smart 3 App



ReSound LiNX 3D - ReSound ENZO 3D

Varje Sound Enhancer kontroll är beroende av vad som programmerats i hörapparaten.

Tillgänglighet i program	Buller	Tal	Vind	B/M/T
Allround	○	○	○	●
Restaurang	●	●	○	●
Musik	●	○	○	●
Utomhus	●	○	●	●
Föreläsning	●	●	○	●
Akustisk telefon	○		○	●
Telespoleprogram	●			●
DAI	●			●

Programmen i hörapparaterna måste innehålla samma inställning. T.ex. måste vindbrusreduktion finnas i programmet för att "Vind" ska synas i appen.

Programmen i hörapparaterna måste ha samma värden. T.ex. måste "SSP: Andel riktverkan" vara likvärdig på båda öronen.

Användaren måste ha båda hörapparaterna i samma program för att justering ska vara möjlig.

Om användaren vill är det möjligt att spara "Favoriter" av sina mest använda justeringar och på så sätt skapa extra program.

• Tillgänglig vid förinställda inställningar

○ Tillgänglig i manuella program per inställning om:

Buller: Noise Tracker II inte står i "per miljö"

Tal: Riktverkan står som Automatiskt Adaptiv Riktverkan eller SoftSwitching

Vind: Vindbrusreducing är påslagen i hörapparaten

B/M/T: Bass/middle/treble frekvensområden:

125Hz-1kHz // 1kHz-3kHz // 3kHz-7kHz

