

Sound Enhancer Hjälpguide – ReSound Smart App



ReSound LiNX² 9, ReSound Enzo² 9, ReSound Up Smart 9

Varje Sound Enhancer kontroll är beroende av vad som programmerats i hörapparaten.

Tillgänglighet i program	Buller	Tal	Vind
All-around	○	○	○
Restaurant	●	●	○
Party	●	●	○
Music	●	○	○
Traffic	●	○	○
Outdoor	●	○	●
Acoustic Phone	○	○	○
TC (in normal program)	●		
TC telefon (in normal program)	●		
DAI (in normal program)	●		

• Tillgänglig vid förinställda inställningar

○ Tillgänglig i manuella program per inställning om:

Buller: Noise Tracker II inte står i "per miljö"

Tal: Riktverkan står som Automatiskt Adaptiv Riktverkan eller SoftSwitching



Vind: Vindbrusreducering är påslagen i hörapparaten

Programmen i hörapparaterna måste innehålla samma inställning. T.ex. måste vindbrusreduktion finnas i programmet för att "Vind" ska synas i appen.

Programmen i hörapparaterna måste ha samma värden. T.ex. måste "SSP: Andel riktverkan" vara likvärdig på båda öronen.

Användaren måste ha båda hörapparaterna i samma program för att justering ska vara möjlig.

Om användaren vill är det möjligt att spara "Favoriter" av sina mest använda justeringar och på så sätt skapa extra program.

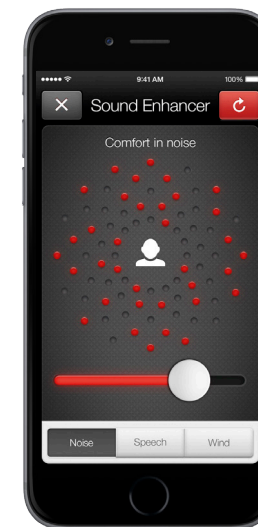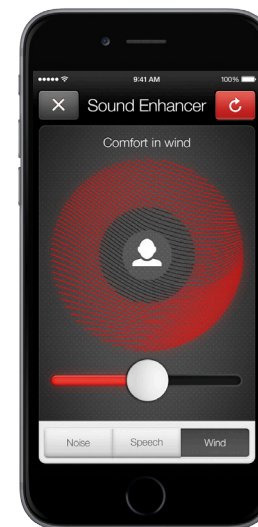

ReSound GN