

# Parningsguide för ReSound Unite™ tillbehör

---

## Unite™ TelefonClip+ (telefonclipet måste vara laddat)

### Para TelefonClip+

Slå på TelefonClip+ genom att skjuta På/Av-knappen ner så ett vitt "I" blir synligt och LED-indikatorn blinkar grönt. Ta bort det silverfärgade locket från TelefonClipet.

- **med mobiltelefon** (Bluetooth)

Följ telefonens instruktioner för Bluetooth-anslutning. Aktivera Bluetooth i telefonen. Tryck sedan kort på den lilla blå knappen på TelefonClip+. Parningsläget är nu aktivt i 2 min (LED-indikatorn lyser blått). Koderna är 0000 (fyra nollor).

- **med hörapparat**

Tryck kort på den lilla vita knappen på TelefonClip+. Parningsläget är nu aktivt i 20 sek (LED-indikatorn blinkar gult). Stäng hörapparaternas batterilucka inom dessa 20 sek. Parningen bekräftas av en melodi i hörapparaterna = **KLART!**

---

## Unite™ TV/Audio-streamer

### Anslut till din TV/stereo/dator

Beroende på vad din TV, stereo, dator mm har för audio-utgång kopplas det på olika sätt. Följ instruktionerna i bruksanvisningen.

### Para TV/Audio-streamer med hörapparat

Koppla in Unite TV/Audio-streamer i vägguttaget (grönt ljus). Tryck en gång på Parningsknappen (P) på TV/Audio-Streamern. Parningsläget är nu aktivt i 30 sek (orange ljus). Stäng hörapparaternas batterifack (inom dessa 30 sek). Parningen bekräftas av en melodi i hörapparaterna = **KLART!**

---

## Unite™ Fjärrkontroll

### Para Fjärrkontrollen med hörapparat

Fjärrkontrollen ska ha nya batterier. Öppna batterifacket och tryck kort på den lilla röda parningsknappen på fjärrkontrollen. Parningsläget är nu aktivt i 30 sek. Stäng hörapparaternas batterilucka (inom dessa 30 sek). Parningen bekräftas av en melodi i hörapparaterna = **KLART!**

---

## Unite™ MiniMikrofon (minimikrofonen måste vara laddad)

### Para MiniMikrofonen med hörapparat

Slå på MiniMikrofonen och ta bort det silverfärgade locket. Tryck kort på den lilla röda parningsknappen. Parningsläget är nu aktivt i 20 sek (blinkande gult ljus). Stäng hörapparaternas batterilucka (inom dessa 20 sek). Parningen bekräftas av en melodi i hörapparaterna = **KLART!**

---

*Ytterligare information finns att läsa i respektive bruksanvisning.*